

bebird®

Note3 Pro Maxを使用する

1 QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。



2 本体の蓋を外すと電源が入ります。



電源が入るとロゴが点滅します。

スマートフォンとの接続方法

アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。

3 スマートフォンのWiFi設定から「bebird-Note3-XXXXXX」を選択して接続します。

4 アプリを開き、表示内容にタップすると使用開始になります。



耳かきピンセットの使用方法

本体に付いている耳かきヘッドを取り外すと、ピンセットになります。

5 アプリを開き、アプリ上にある「耳ピンセット」をタップし、青色のピンセットボタンで操作します。

6 ピンセットの開閉は、ピンセットボタンで操作可能です。耳垢を取り除くことができます。



耳かきヘッドの交換方法

耳かきヘッドをピンセットの先端に取り付けます。

ご注意：耳かきヘッドのシリコン部分に割れや浮きがないことをご確認ください。耳かき中に耳の中で緩んで外れる恐れがありますので、ご使用前に必ずご確認の上ご使用してください。

横になって耳かきをするときは、耳の中を傷つけないよう、保護カバーを取り付けてご使用ください。

同じ耳かきヘッドを長期間使用することをおすすめしません。材料の劣化による断裂を避けるために、3ヶ月ごとまたは電や割れが発生した場合はすみやかに交換することをお勧めします。

充電時：赤色が点灯
充電終了時：赤色が消灯
WiFiの接続時：青色が点灯
バッテリー残量時：青色が高減速

図の様に本体の底部を下向きに置きます。充電が開始されると赤色のランプが点灯します。

充電スタンドにUSB充電ケーブルを挿します。



収納ボックス

反時計回り

反時計回りに収納ボックスの上部(透明部分)を回すと収納ボックスが開きます。付属の耳かきヘッドを中で保管することができます。

同梱物

- 1 耳かきヘッド(S)×5 (シリコン素材)
- 2 耳かきヘッド(L)×4 (シリコン素材)
- 3 耳かきヘッド(R)×4 (シリコン素材)
- 4 シリコン製保護カバー×1
- 5 クリーニング用ブラシ×1
- 6 アルコール綿棒×5
- 7 ソフト綿棒×5
- 8 AtoC 充電ケーブル (USB/Type-Aアダプタ別売)



製品サイズ

レンズサイズ 5.0mm

14mm

15mm

36mm

162.8mm

40.5mm

56mm



故障/トラブルの原因や解決方法

症状	解決方法
起動時にランプが点灯せず、動作しない	本体を蓋から出し入れして、電源を再起動してください。 電源ランプが点灯しない場合、バッテリー切れの可能性がります。1時間程度充電してからお使いください。
レンズのLEDライトが点灯しない	本体を蓋から出し入れして、電源を再起動してください。
アプリが起動しない	既存アプリをアンインストールし、QRコードをもう一度スキャンし、インストールしてください。
耳かきヘッドがしっかり取り付けられない	耳かきヘッドやレンズにゴミ等が付着していないか確認してください。詳細は「耳かきヘッドの交換方法」をご確認ください。
電源ランプが青色に高速点滅し自動的に電源が切れてしまう	バッテリー残量が低下しています。1時間程度充電を行ってから再度お使いください。
本体がアプリと接続しているが、画像が正常に表示しない	①スマートフォン設定のWiFi接続を一度オフしてから再度オンにしてください。 ②再度、「bebird-Note3-XXXXXX」に接続し、アプリを再起動してください。
WiFi接続が不安定ですぐに切れてしまう	本体の電源を入れ直してください。
上記の操作で問題が解決しない場合は、サポートセンターにご連絡ください。	

使用上の注意事項

- レンズを清掃する際には、付属のアルコール綿棒又はアルコールコットンなどで拭いてください。付属の綿棒は本体清掃用です。人体には使用しないでください。
- 移動しながら耳かきを使用しないでください。また使用中に他人にぶつからないように、ご注意ください。
- 小さいお子様が間違えて使用しないように、手の届かない場所に保管してください。また、小さな部品も含まれているので、飲み込まないようにご注意ください。
- 事故防止のため、お子様一人でのご使用をしないでください。必ず大人の方が耳かきをしてください。
- 本体は防水仕様ではないため、水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 本体はリチウムイオン電池が内蔵されています。長時間使用しない場合は、1か月に1回は充電してください。
- DC5Vの充電器を使用して本体を充電してください。充電しながら使用しないでください。また、製品を充電する充電端子が露出しており、金属片などが入らないようにご注意ください。異物が入ると発煙/発火の原因となります。
- 直射日光の当たる場所には本体を置かないでください。故障の原因になります。
- ご使用中に本体が熱くなることがございます。放熱処理を行っているため、不良品ではありません。ただし、高温が続く場合は、使用を速やかに中止してQRコードをカメラで読み取り、サポートセンターにご連絡をお願いいたします。
- 本製品には繰り返し充電可能なリチウムイオン電池が内蔵されています。破棄する場合は、家庭用ごみと一緒に捨てないでください。本製品を破棄する場合は、お住まいの自治体などの規則に従って頂くか、msupport@futuremodel.co.jpまでお問合せください。

同梱物の使用方法

クリーニング

- ＜アルコール綿棒＞
本体カメラ先端部などを清掃するために使用します。
- ＜ソフト綿棒＞
本体カメラ先端部などを清掃するために使用します。
- ＜クリーニング用ブラシ＞
本体カメラ先端部、充電部などの汚れや異物の付着が酷い時に付着物を取り除くために使用します。
- ＜シリコン製保護カバー＞
カメラ部分で耳道を傷つけないよう保護するために使用します。

充電

＜充電方法＞

- ・充電スタンド外面の充電口に付属のType-C充電ケーブルを接続します。
- ・Type-C充電ケーブルの反対側(USB-A)を充電器(別途ご用意が必要)に接続します。
- ・製品本体の持ち手部分を下にして充電スタンドに挿し立てます。持ち手部分の電源ランプが赤く点灯したら充電開始です。充電が終了すると消灯します。
- ・製品本体は充電しながらの使用はできません。

基本仕様

ブランド: bebird

製品名: スマート耳かき Note3 Pro Max

製品型番: IOT-BD-N3-WH(ホワイト)、IOT-BD-N3-BL(ブルー)

製品モデル: Note3 Pro Max

製品サイズ: 本体 直径 14×高さ 162.8mm
充電スタンド 直径 56×高さ 40.5mm

重さ: 本体 33g スタンド 95g

WiFi: IEEE802.11b/g/n

動作周波数: 2.4GHz

fps値: 20fps

動作温度: -10~45°C

使用電池: リチウムイオン(Li-ion)電池(DC3.7V300mAh)

連続使用時間: 約70分

充電時間: 約60分

定格入力: DC5V/0.5A

レンズサイズ: 3.5mm

レンズの焦点距離: 15.5mm


被写界深度: 10~50mm

カメラ画素数: 1000万

ジャイロスコープ: 6軸

☎ 210-163770

日本正規代理店
株式会社IoTBank
東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー 28F
サポートセンターはこちらへ



保証書

製品型番	
お客様のお名前	
お客様のご住所	〒
ご連絡先電話番号	
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	

販売店にて記載(レシートの添付) 問い合わせ先



＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には、1製品につき1回無料修理をさせていただきます。製品に添付されている保証書ならびに購入記録等を添えて、サポートセンターまでご連絡ください。修理交換後に、保証期間は延長されません。また、綿棒、耳かきやバッテリーなどの消耗品は無料修理に含まれておりません。
- ご贈答品の修理に関するご相談は、サポートセンターまでご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理または修理をお断りさせていただきます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧に起因する故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤保証書と購入記録等の提示がない場合。
 - ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - ⑦当社指定の国内正規品以外の使用。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。(This warranty is valid only in Japan)
- 海外からの着払い、海外への修理品の発送はいたしません。※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動などのために利用させていただきます。この保証書は、本所に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、サポートセンターにお問い合わせください。※本規定は、予告なく変更することがあります。

2022年6月23日 制定

bebird®

取扱説明書兼保証書

Note3 Pro Max